

Bruksanvisning Korg- och brickdispenser

Art: 152299

2021-01-02



Användningsområde

Dispensern är avsedd för transport och förvaring av brickor eller korgar inom sjukhusmiljö.

Uppackning

Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas med en fuktig trasa.

Transportskador OBS!

Undersök godset noga efter uppackning och kontrollera om det utsatts för skador under transporten. Om godset är skadat ska skadan omedelbart anmälas till transportbolaget (måste anmälas inom sju dagar efter ankomst).

Transportsäkringar

Dispensern är inte utrustad med några speciella transportsäkringar annat än emballaget.

Installation

Dispensern levereras med 38 stycken dragfjädrar. Några kan behövas tas bort för att korgplanet ska ligga i rätt nivå. För att häkta av fjädrarna lyfter man först av frontplåten, sen kan valfritt antal fjädrar häktas av. När dispensern är rätt inställd ligger alltid översta korg i ergonomisk riktig höjd (900 mm).

Beskrivning

Korgdispensern är stabil och tillverkad av rostfri plåt. Korgplanet är försett med styrningar för sterilkorgar. Korgplanet är upphängt i 38 stycken dragfjädrar, vilket oftast är mer än vad som behövs. Fjädrarna sitter bakom en löstagbar frontplåt och kan lätt häktas av. Dispensern är försedd med fyra svängbara hjul varav två är bromsbara.

Skötsel

Dispensern diskas i kabinettmaskin alternativt rengörs med skonsamt rengöringsmedel och fuktig trasa.

Säkerhet

Produkten är konstruerad och tillverkad enligt SS EN 292.

Garanti

Två års garanti lämnas på produkten enligt NL01 leveransbestämmelser om inte annat överenskommit. Vid garantiåtgärder måste serienummer och typbeteckning anges. Märkskylt med typbeteckning, serienummer och tillverkningsår är placerad på ryggplåten.

Service och reservdelar

Vid behov av service/repairation kontakta Silver & Stål AB. Ta reda på beteckning och serienummer från märkskylten.

SILVER STÅL

Engelbrektsgratan 1, 643 31 Vingåker tel, +46 151 51 15 60, order@silverstal.se